



## ЛАКТИК Тест

для животноводческих комплексов

тестер для определения количества соматических клеток в молоке

Тестер для определения количества соматических клеток в молоке. ЛАКТИК Тест позволяет определить наличие соматических клеток в молоке до проявления клинических признаков. Это позволяет выявить заболевание отдельной четверти вымени на ранних стадиях и сократить убытки от потери молокоотдачи.

ЛАКТИК Тест прост в использовании. Быстрая интерпретация результатов. Изменения цвета и/или вязкости показывает увеличение соматических клеток более 100.000 Ед. Точность определения зависит от личной практики.

### **Применение:**

- Тест должен быть проведен до доения.
- Сцедить первые три струйки молока, содержащие повышенное количество соматических клеток и микроорганизмов, в отдельную емкость.
- Из каждой доли вымени сцедить немного молока в соответствующую чашу тест пластины.
- Слейте лишнее молоко до линии указателя уровня на тест пластине. Нажать на дозирующий насос по одному разу. Внести тестер в чашку тест пластины.

Легкими круговыми движениями перемешать тестер с молоком. Через несколько секунд произвести интерпретацию теста.

### **Хранение:**

В сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей и животных месте, при температуре от +5 до +25 °С.

### **Фасовка:**

500 мл

### **Производитель:**

Изготовлено по заказу ООО «Торговый дом ВИК», ИП «ВИК - здоровье животных» (Беларусь).